

Utilisation du clavier

ASSISTO


collectionassisto.com

Fermeture du drain

Cet écran indique que la porte est dans la bonne position, en attente d'une action de l'utilisateur.



Afin d'obtenir la température désirée et d'éviter les risques de brûlure, éveiller l'interface en appuyant sur une touche et ajuster la température de l'eau.

Glisser la poignée vers le dossier pour déverrouiller la porte. Tirer la poignée pour la monter ou la descendre à la hauteur souhaitée.

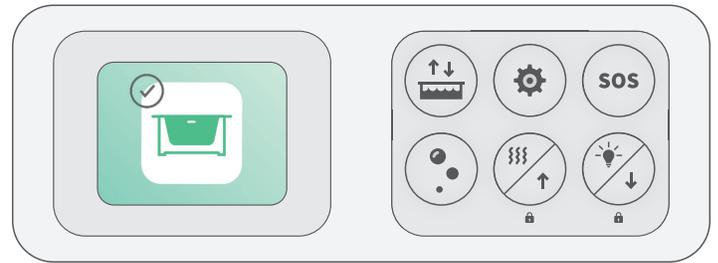


Pour fermer le drain et remplir la baignoire.

1. Une fois la porte remontée, maintenir le bouton de remplissage/vidange enfoncé pendant 3 secondes pour sceller la porte.
2. Remplir la baignoire d'eau à la hauteur et à la température désirées.

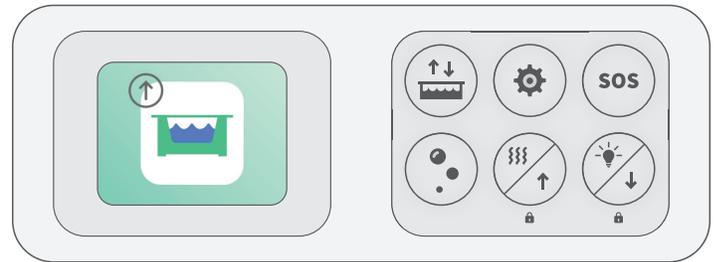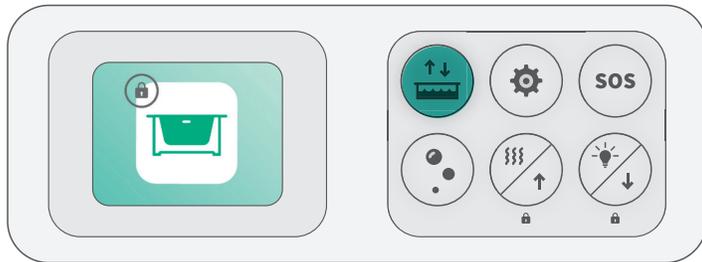


3. Cet écran s'affiche pendant le bain: l'heure et la température de l'eau sont affichées.

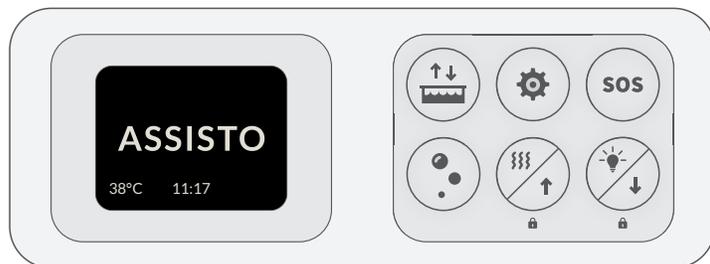

Ouverture du drain

Cet écran s'affiche pendant le bain, en attente qu'une nouvelle fonction soit sélectionnée. L'heure et la température de l'eau sont affichées, elles peuvent être changées en utilisant le menu.

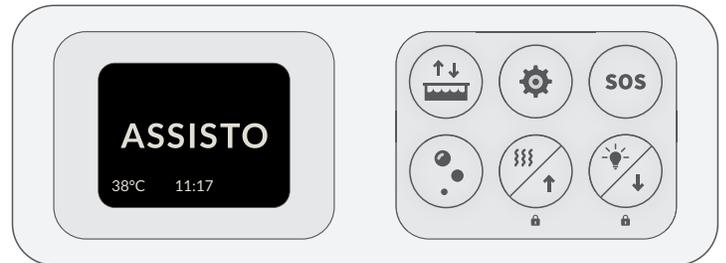


Pour ouvrir le drain et vider la baignoire.


1. Une fois le bain terminé, maintenir le bouton de remplissage/vidange enfoncé pendant 3 secondes.




2. La baignoire se vide.

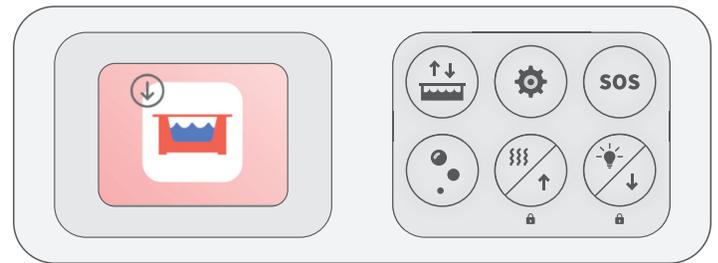



3. Un décompte de 5 secondes s'affiche; à la fin de ce décompte, la porte se desceller. Glisser la poignée vers le dossier pour déverrouiller la porte, puis appuyer pour la descendre.

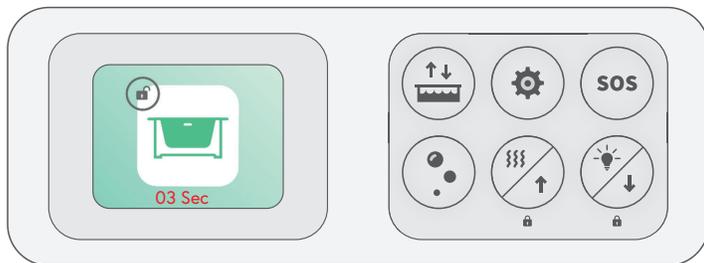

4. Le bouton du système de massage clignote pour indiquer que les jets d'air se purgent.

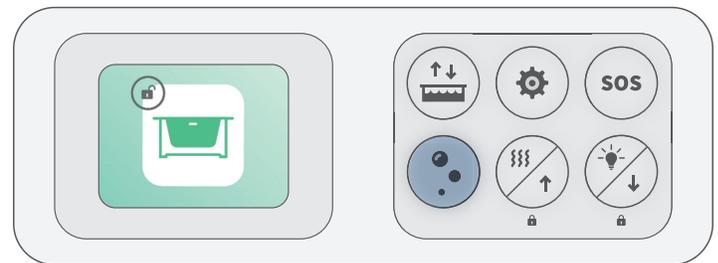

5. Lorsque l'affichage de l'écran alterne entre ces deux images, l'alimentation en eau du robinet est temporairement coupée, car il y a trop d'eau dans le réservoir.

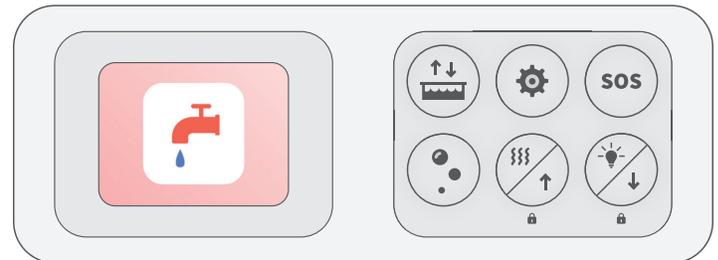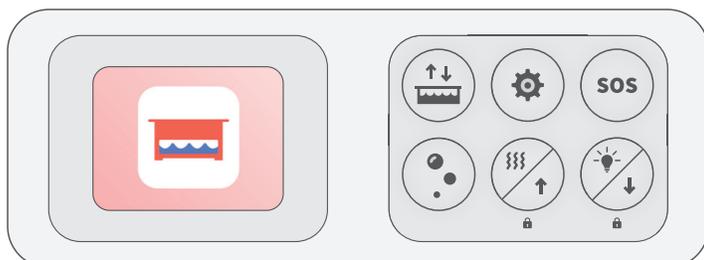

Service après-vente

1 844 466-7837

sav@collectionassisto.com

REV. : 03-21


ASSISTO

collectionassisto.com

Système de massage



Cet écran est en attente qu'une action soit posée pendant la baignade: l'heure et la température de l'eau sont affichées et peuvent être changées en utilisant le menu.

Le système de massage ne peut être activé qu'en mode baignade.


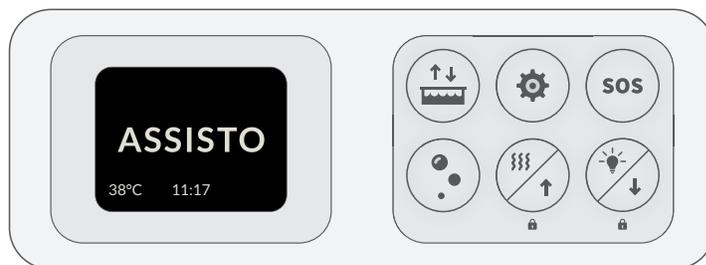


Pour activer les différentes vitesses ou les différents cycles du souffleur.



1. Appuyer une fois sur le bouton du système de massage pour activer les jets d'air en vitesse 1 (minimum).
2. Appuyer une seconde fois sur le bouton du système de massage pour activer les jets d'air en vitesse 2.

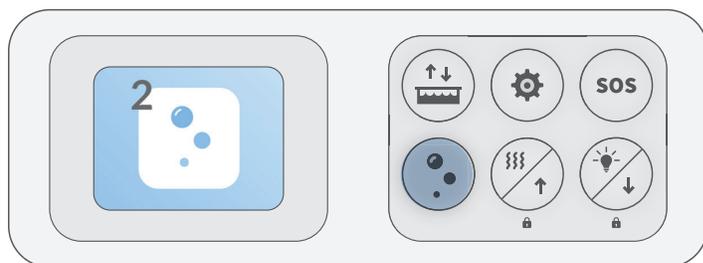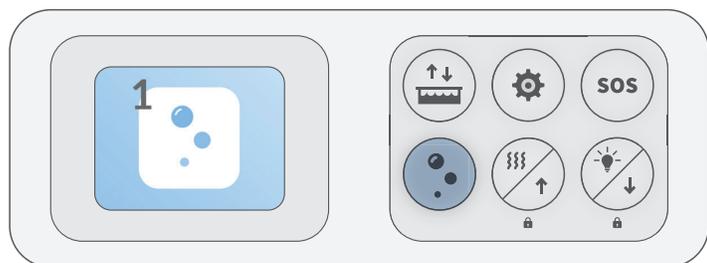

3. Appuyer une troisième fois sur le bouton du système de massage pour activer les jets d'air en vitesse 3 (maximum).
4. Appuyer une quatrième fois sur le bouton du système de massage pour activer les jets d'air en mode vague.

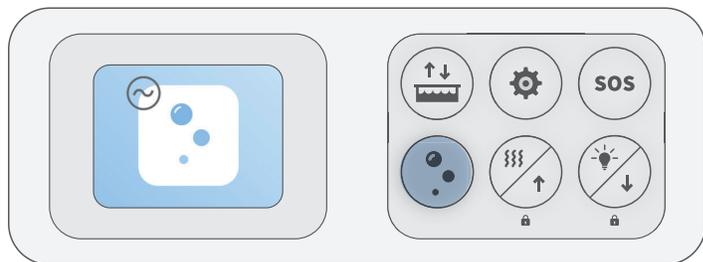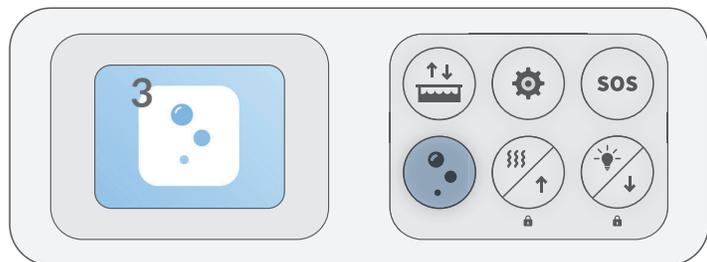

5. Appuyer une cinquième fois sur le bouton du système de massage pour activer les jets d'air en mode séquentiel.
6. Appuyer une sixième fois sur le bouton du système de massage pour le désactiver.

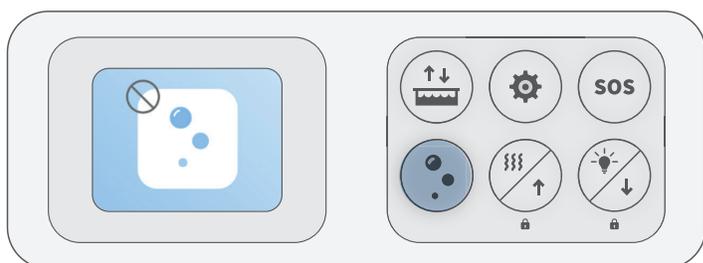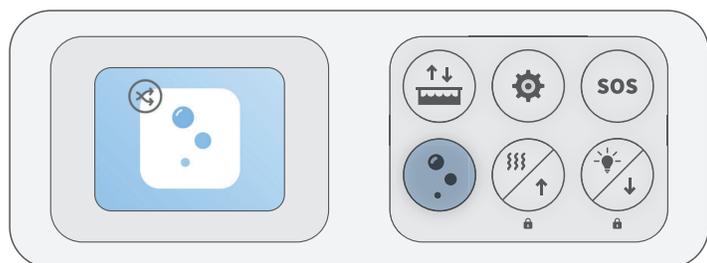

Service après-vente

1 844 466-7837

sav@collectionassisto.com


REV: 02-21

ASSISTO

collectionassisto.com



Systeme de dossier chauffant

Cet écran est en attente qu'une action soit posée pendant la baignade: l'heure et la température de l'eau sont affichées et peuvent être changées en utilisant le menu.

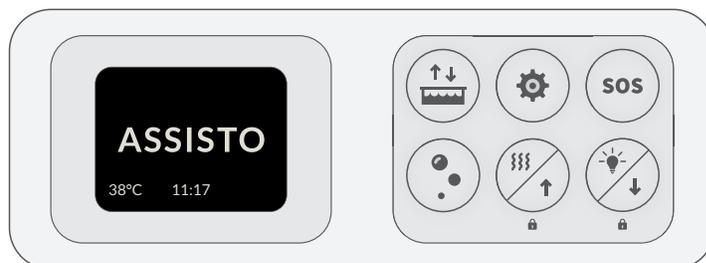


Pour activer les différentes intensités de chaleur du dossier chauffant.

1. Appuyer une fois sur le bouton du dossier chauffant pour l'activer à la puissance maximale.
2. Appuyer une seconde fois sur le bouton pour mettre le dossier chauffant à 50% de puissance.

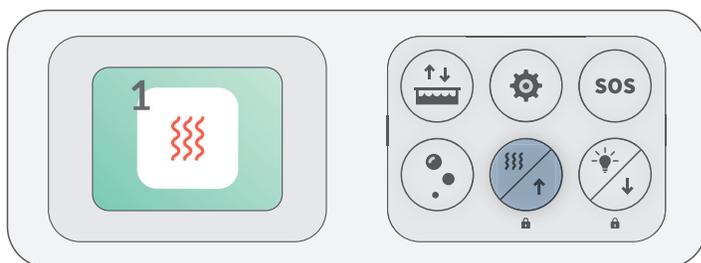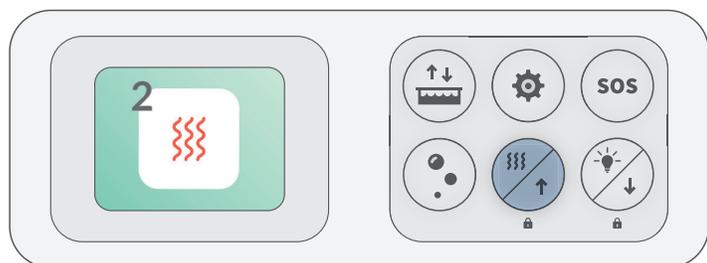


3. Appuyer une troisième fois sur le bouton pour désactiver le dossier chauffant.

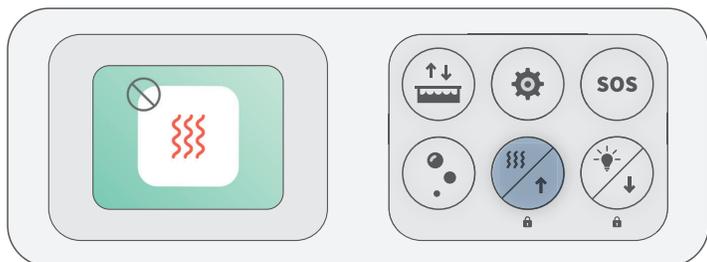


Systeme de chromotherapie

Cet écran est en attente qu'une action soit posée pendant la baignade: l'heure et la température de l'eau sont affichées et peuvent être changées en utilisant le menu.

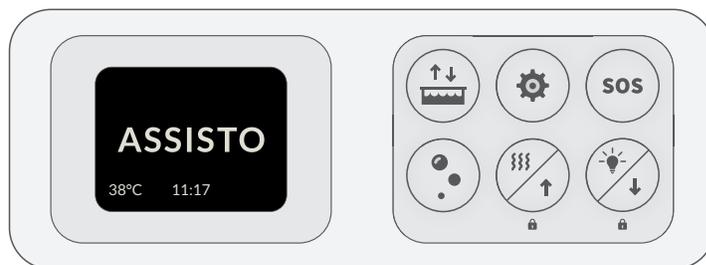


Pour activer les différentes couleurs des lumières.


1. Appuyer une fois sur le bouton de chromothérapie pour activer la lumière blanche.

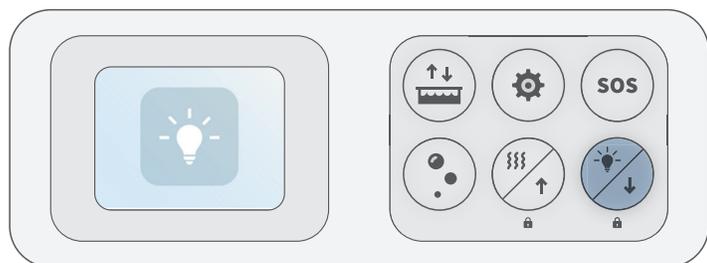


2. Appuyer une seconde fois sur le bouton de chromothérapie pour activer le mode arc-en-ciel.

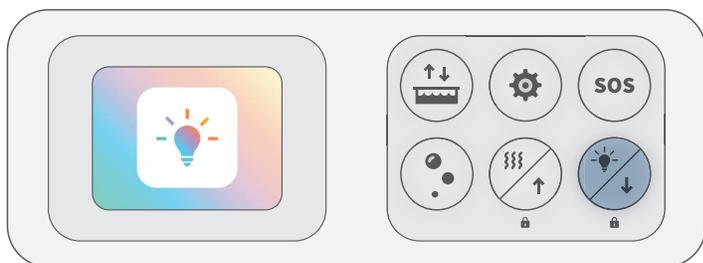


3. Appuyer une troisième fois sur le bouton de chromothérapie pour arrêter le mode arc-en-ciel sur la couleur affichée.

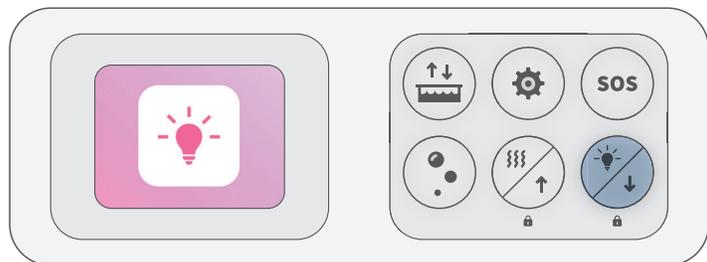


4. Appuyer une quatrième fois sur le bouton de chromothérapie pour activer la couleur aqua.

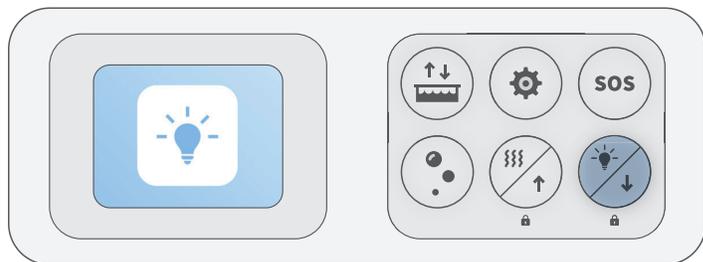

5. Appuyer une cinquième fois sur le bouton de chromothérapie pour activer la couleur bleue.

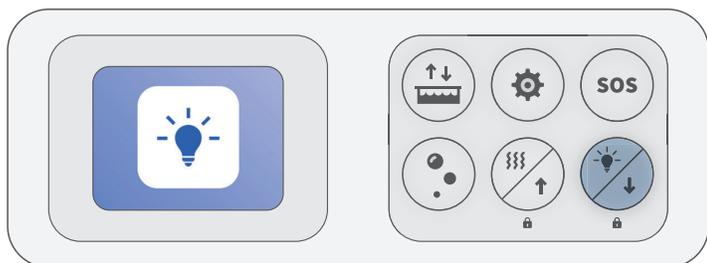

6. Appuyer une sixième fois sur le bouton de chromothérapie pour activer la couleur magenta.

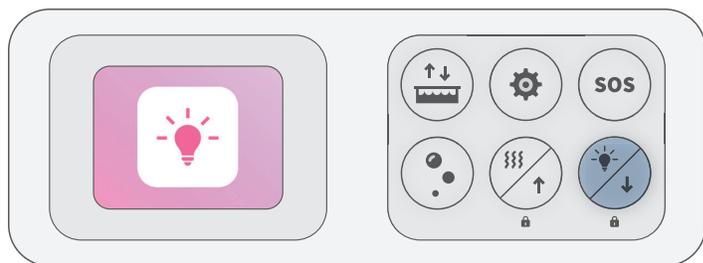

Service après-vente

1 844 466-7837


sav@collectionassisto.com

REV: 02-21


ASSISTO

collectionassisto.com


7. Appuyer une septième fois sur le bouton de chromothérapie pour activer la couleur rouge.

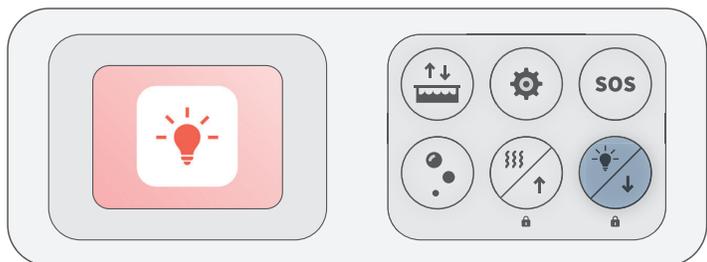


8. Appuyer une huitième fois sur le bouton de chromothérapie pour activer la couleur orange.

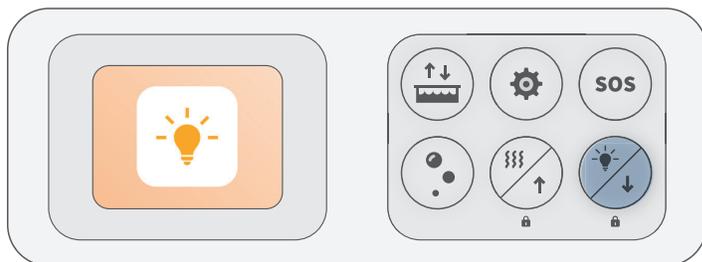

9. Appuyer une neuvième fois sur le bouton de chromothérapie pour activer la couleur jaune.

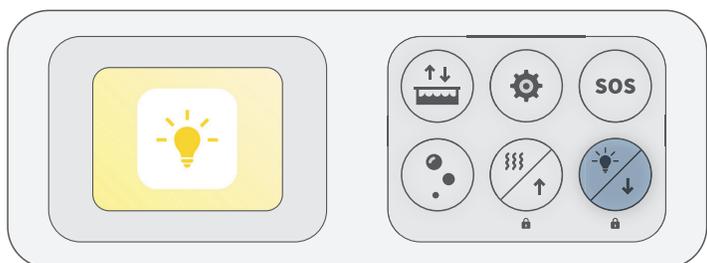


10. Appuyer une dixième fois sur le bouton de chromothérapie pour activer la couleur verte.

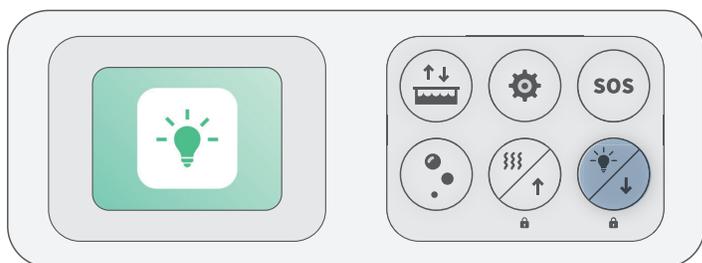

11. Appuyer une onzième fois sur le bouton de chromothérapie pour désactiver la lumière*.

* À n'importe quel moment, maintenir le bouton de chromothérapie pendant 1 seconde pour désactiver la lumière.

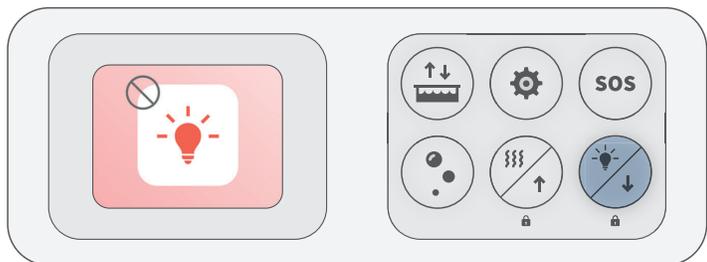


Réglage température et langue

Le bouton représentant un engrenage fait apparaître le menu et devient le **bouton de sélection** lorsque le menu est ouvert.

Les flèches servent à **navigation dans le menu**.

L'élément sélectionné sur l'écran apparaît **en bleu**.

Le menu est accessible seulement lorsque le bain **n'est pas scellé**.


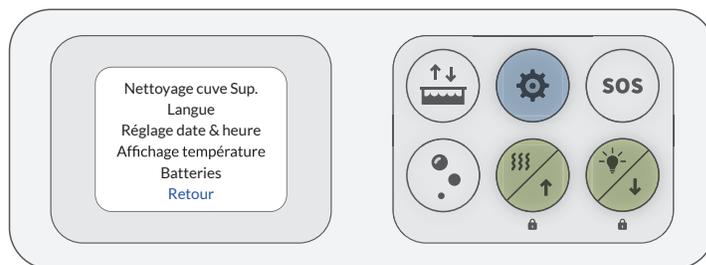


Pour régler l'unité de mesure de la température

1. Appuyer sur la flèche vers le haut deux fois*.

* La disposition du menu est la même dans les deux langues.



2. Appuyer sur le bouton de sélection pour choisir « Affichage température ».

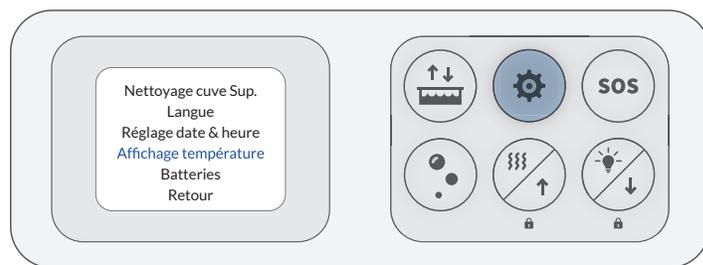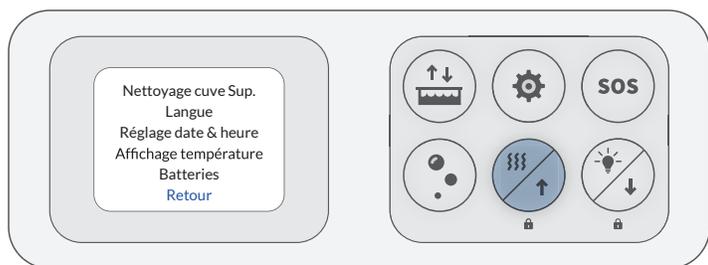

3. Appuyer sur les flèches pour faire votre choix entre Fahrenheit et Celsius, et appuyer sur le bouton de sélection.



Pour régler la langue

1. Appuyer sur la flèche vers le haut quatre fois.

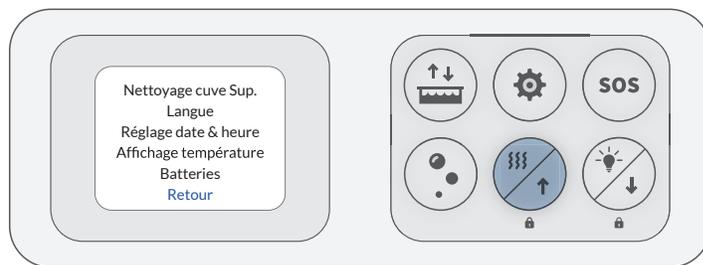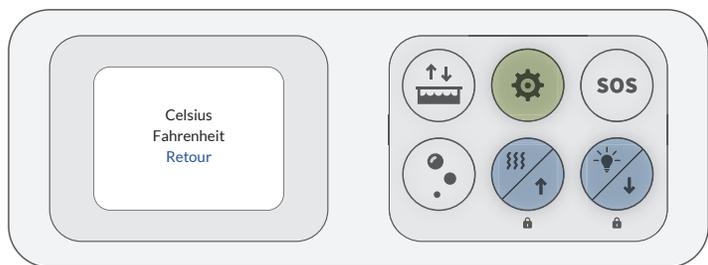

2. Appuyer sur le bouton de sélection pour choisir « Langue ».

3. Appuyer sur les flèches pour faire votre choix entre Français et Anglais, et appuyer sur le bouton de sélection.

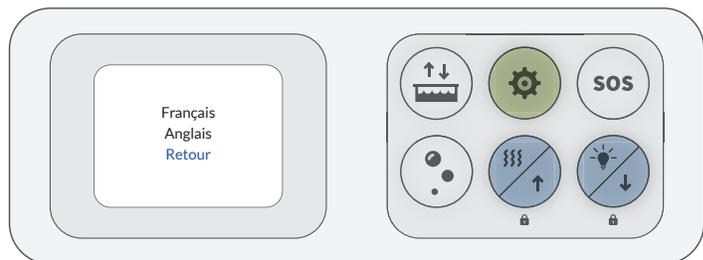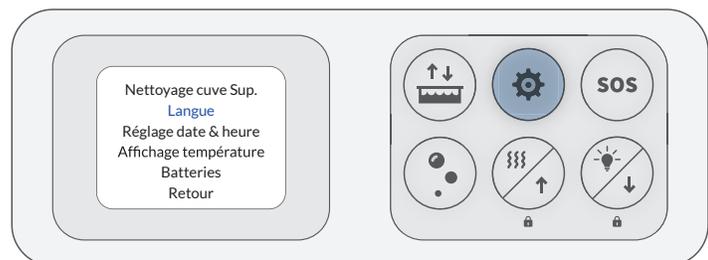

Service après-vente

1 844 466-7837

sav@collectionassisto.com

REV: 02-21

ASSISTO

collectionassisto.com


Réglage date et heure

Le bouton représentant un engrenage fait apparaître le menu et devient le **bouton de sélection** lorsque le menu est ouvert.


Les flèches servent à **navigation dans le menu**.

L'élément sélectionné sur l'écran apparaît **en bleu**.


Le menu est accessible seulement lorsque le bain **n'est pas scellé**.

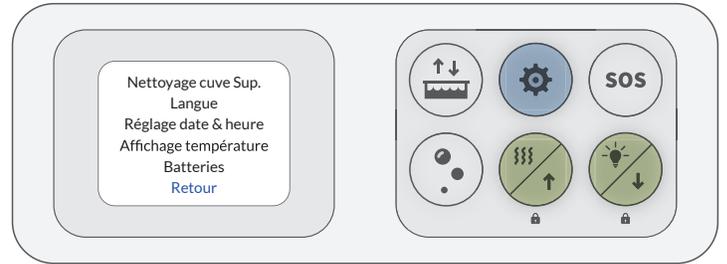


1. Appuyer sur la flèche vers le haut trois fois.

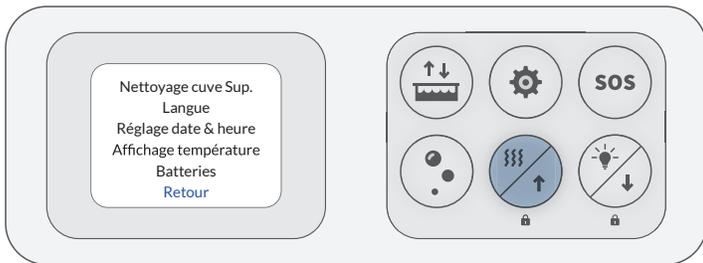


2. Appuyer sur le bouton de sélection pour choisir « Réglage date & heure ».

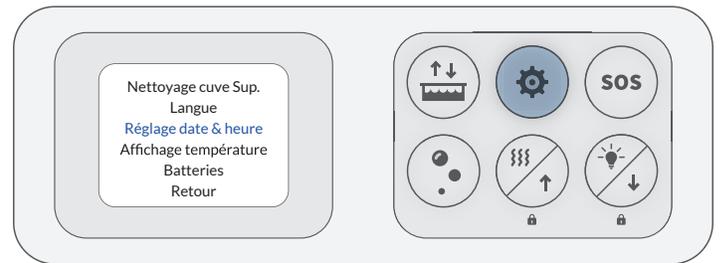


3. Appuyer sur la flèche vers le haut deux fois.

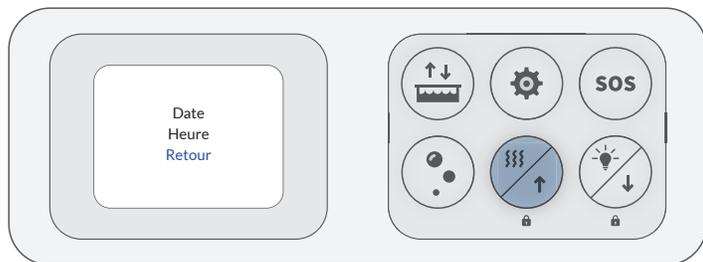


4. Appuyer sur le bouton de sélection pour choisir « Date ».

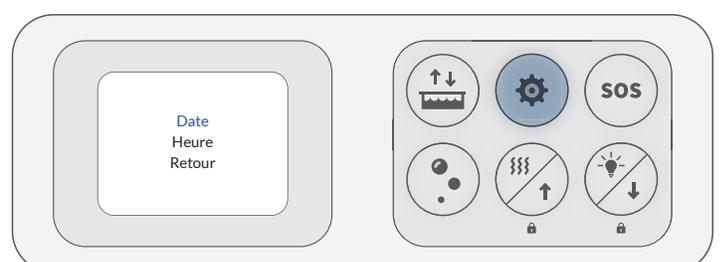


5. En utilisant les flèches, choisir l'année courante et appuyer sur le bouton de sélection.

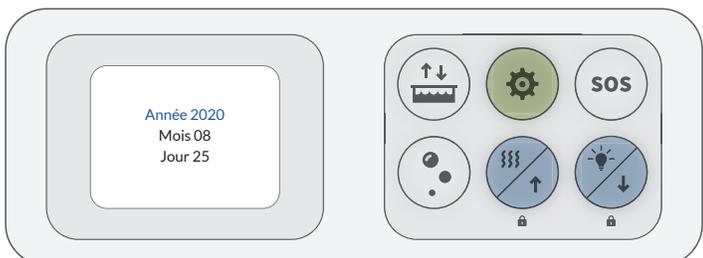


6. En utilisant les flèches, choisir le mois courant et appuyer sur le bouton de sélection.

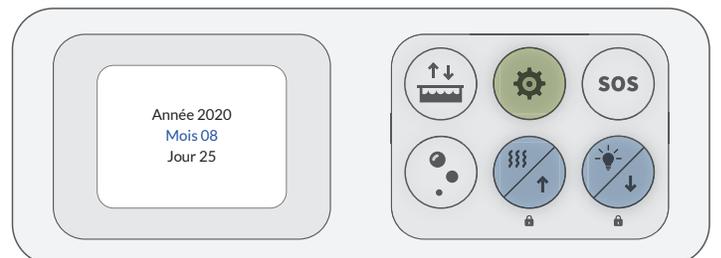


7. En utilisant les flèches, choisir le jour courant et appuyer sur le bouton de sélection.

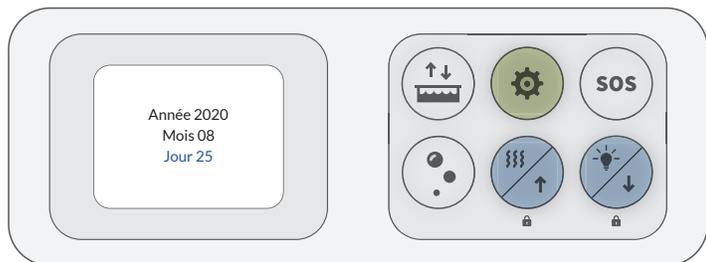


8. Appuyer sur la flèche vers le haut une fois.

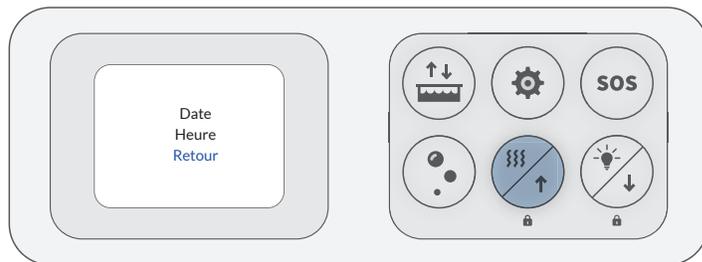


9. Appuyer sur le bouton de sélection pour choisir « Heure ».

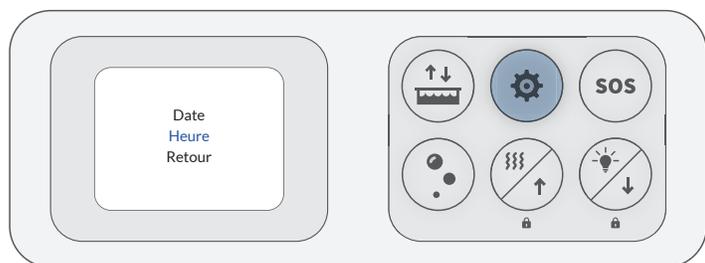


10. En utilisant les flèches, choisir l'heure et appuyer sur le bouton de sélection.

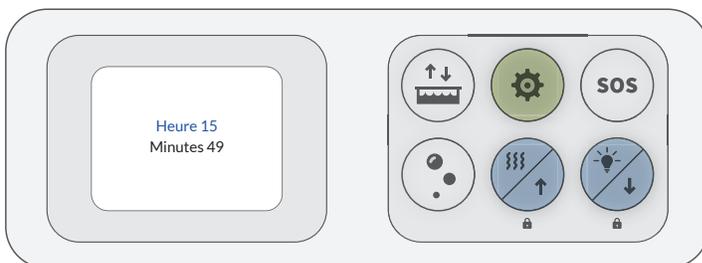

11. En utilisant les flèches, choisir les minutes et appuyer sur le bouton de sélection.

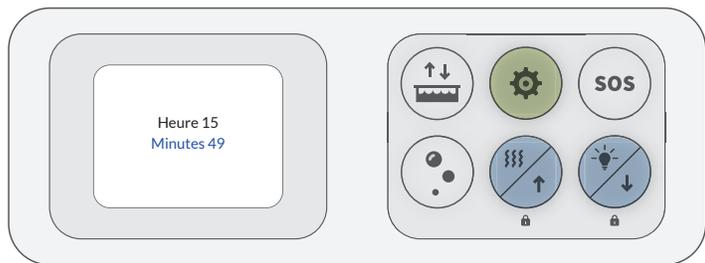


12. Appuyer sur le bouton de sélection pour revenir au menu principal.

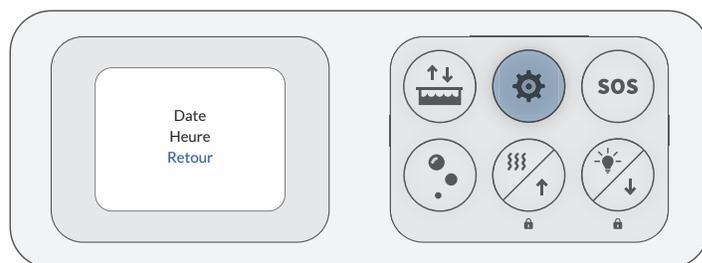



En cas d'urgence

Cet écran est en attente qu'une action soit posée pendant la baignade: l'heure et la température de l'eau sont affichées et peuvent être changées en utilisant le menu.

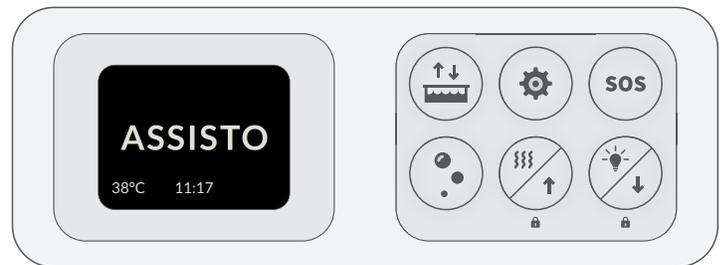

En cas d'urgence ou de défectuosité du système.

1. Maintenir une pression sur le bouton SOS pendant 3 secondes.
 2. Le bouton SOS permet le dégonflage immédiat du joint d'étanchéité et le drainage de l'eau*.
- * Risque de dégât d'eau, en cas d'urgence seulement.

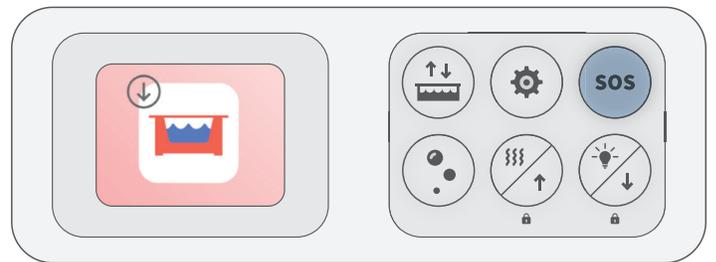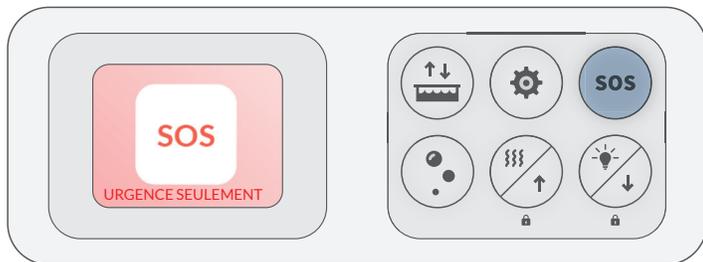


Réinitialisation du panneau de contrôle

Cette écran indique un code d'erreur.

Les codes d'erreur de série 1XX nécessitent une action de l'utilisateur.



Les codes d'erreur de série 2XX nécessitent une action préventive.

Finalement, les codes de série 3XX nécessitent une action importante. En cas d'erreur 3XX, contacter notre service après-vente.

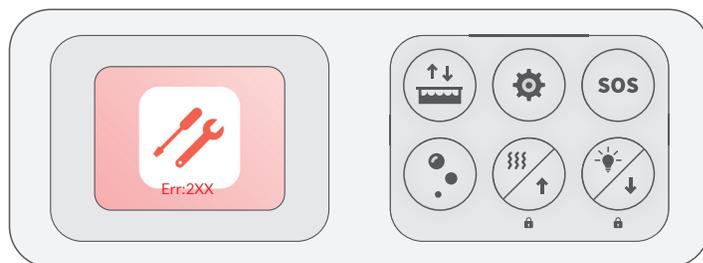

1. Pour effacer le code d'erreur, maintenir une pression sur le bouton menu pendant dix secondes.

2. Le code d'erreur devrait être disparu. À la fin de la prochaine utilisation de la baignoire, le message réapparaîtra si la maintenance n'a pas été faite.

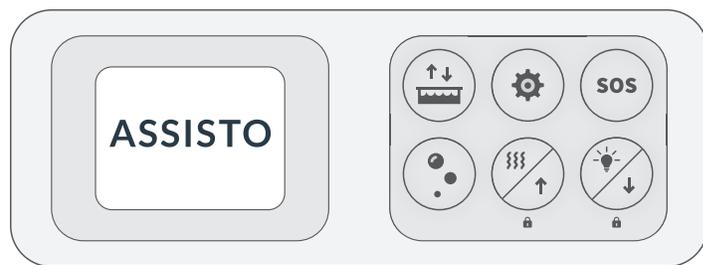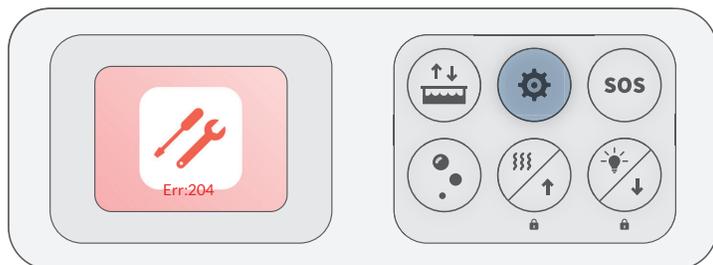


Confirmation du remplacement des batteries

Le bouton représentant un engrenage fait apparaître le menu et devient le **bouton de sélection** lorsque le menu est ouvert.

Les flèches servent à **naviguer dans le menu**.


L'élément sélectionné sur l'écran apparaît **en bleu**.

Le menu est accessible seulement lorsque le bain n'est pas scellé.

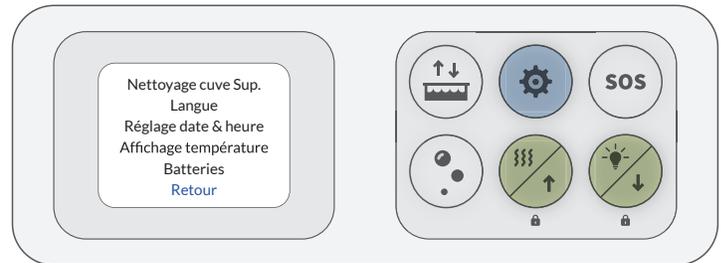


Lorsque vous changez les batteries, ou à la suite d'une panne de courant pendant que le bain était en fonction, il ne faut pas oublier de mettre le compteur à zéro.


1. Appuyer sur la flèche vers le haut une fois.

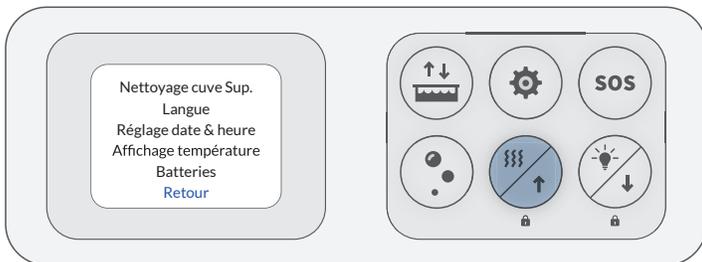

2. Appuyer sur le bouton de sélection pour choisir « Batteries ».

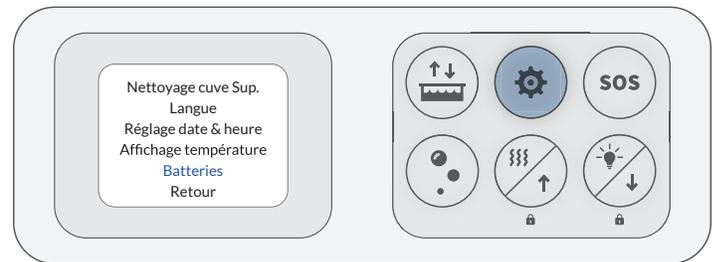


3. Appuyer sur la flèche vers le haut une fois et appuyer sur le bouton de sélection.

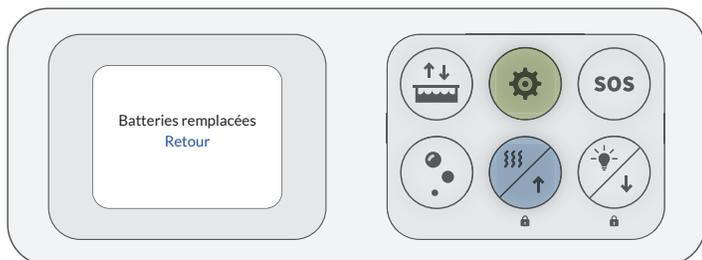

En cas de panne électrique



Lorsqu'une panne survient, cette image s'affiche pendant 1 minute (à moins que le courant ne soit rétabli avant). Si le système de massage et le dossier chauffant sont en fonction, ils s'éteindront, mais la chromothérapie pourra être utilisée.

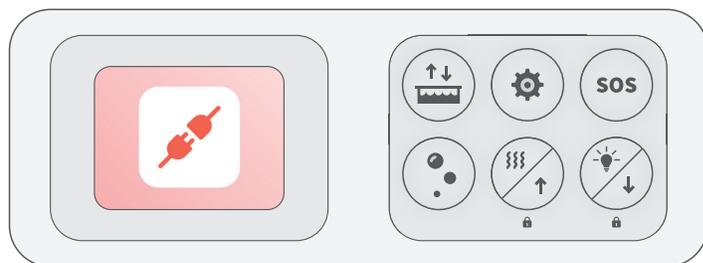

1. Si le courant n'est pas rétabli, un décompte de 90 secondes s'affiche pour indiquer que l'eau du bain va être évacuée automatiquement. Ce décompte permet à l'utilisateur de savoir de combien de temps il dispose pour se rincer avant la vidange*.

* En tout temps l'utilisateur peut décider de vider le bain par lui-même sans attendre la fin du décompte.

2. Si le courant n'est pas rétabli avant la fin du décompte de 90 secondes, les lumières de chromothérapie resteront allumées pendant environ dix minutes (selon l'état des batteries) pour permettre à l'utilisateur de se sécher et de trouver un éclairage d'appoint.

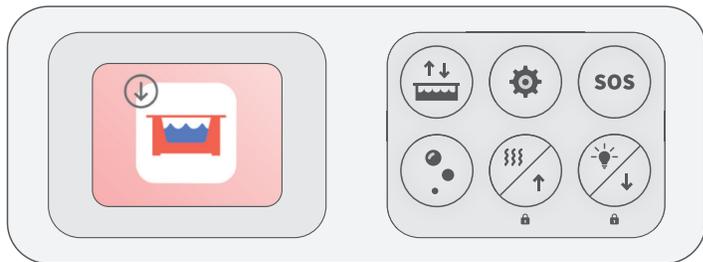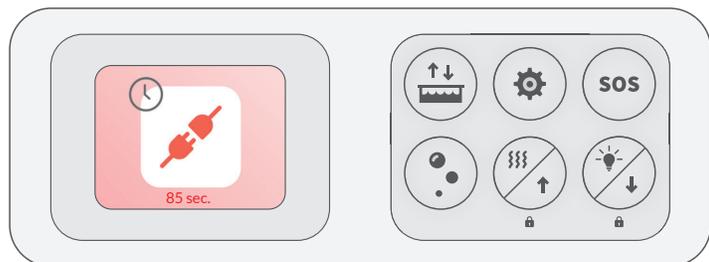

3. Lorsque le bain est utilisé pendant une panne de courant, il est recommandé, une fois le courant rétabli, de faire une remise à zéro du compteur des batteries*.

* Voir la fiche de remplacement des batteries.

